

Lame monouso per microtomia N35



Dispositivo medico-diagnostico in vitro
Codice CND: **W05030599**



Notizie generali

Lame monouso in acciaio inossidabile per taglio al microtomo, confezionate in dispensatore manuale predisposto per il recupero delle lame usate.

Codice	Confezionamento
01-N35	1 dispenser da 50 lame



Produttore: FEATHER Safety Razor Co., Ltd.
5th FL., 5-2, Dojima 1-chome, Kita-ku,
Osaka 530-0003, Japan

Distributore esclusivo per l'Italia: Bio-Optica Milano S.p.A.

Caratteristiche

Lame per microtomia monouso particolarmente indicate per il taglio di campioni duri.

Possono inoltre essere utilizzate anche per tessuti morbidi, per biopsie e per sezioni seriate dopo il trimming.

Da evidenziare la notevole durata di queste lame. Necessitano di un trimming lievemente più lungo, a favore della lunga durata. La compressione è molto ridotta.

Da utilizzare sia con microtomo a slitta che rotativo.


Nel dettaglio, quindi:

- Per campioni duri
- Durata molto lunga della lama
- Idonee anche per campioni in routine, campioni morbidi e biopsie
- Dopo il trimming, idonee anche per sezioni seriate
- Compressione lieve

Dati tecnici

Materiale:	acciaio inossidabile
Lunghezza della lama:	80 mm
Altezza della lama:	8 mm
Angolo del tagliente:	35°
Confezionamento:	dispenser in ABS
Confezionamento unità di vendita:	scatole in carta vinilica rivestita
Conservazione e stoccaggio:	non sono previste particolari misure
Validità del prodotto:	5 anni, dalla data di confezionamento
Smaltimento:	da smaltire in conformità alle normative vigenti.

Schema sistema lama - portalama

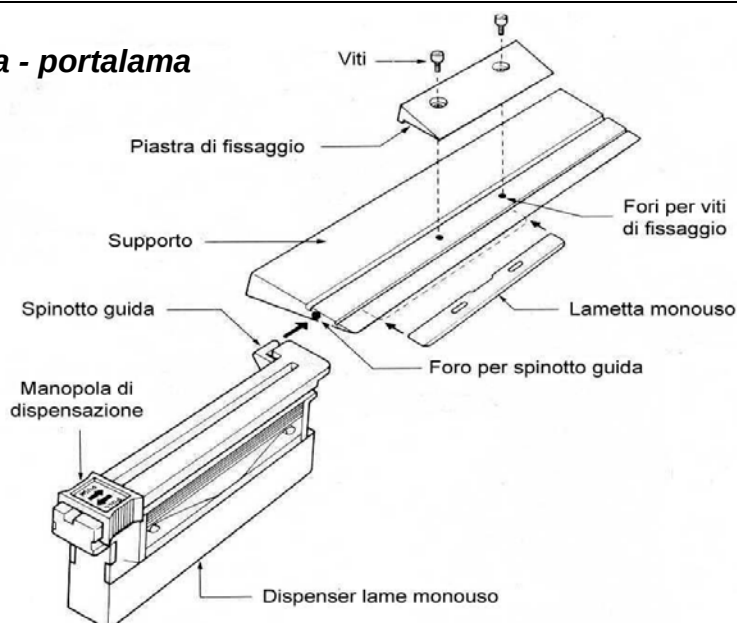

Modalità d'uso con portalama originale Feather

- 1) Fare scorrere la manopola di dispensazione come mostrato in figura 1.

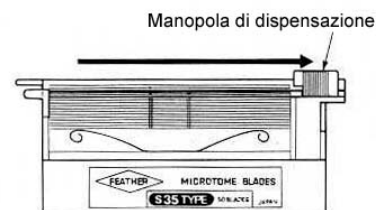


Figura 1


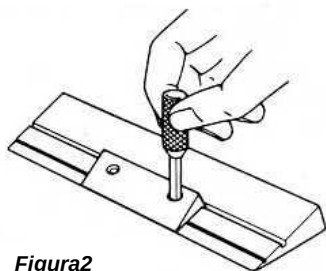



Figura 2

- 2) Allentare le viti della piastra di fissaggio del supporto per lame monouso Feather utilizzando l'apposito cacciavite contenuto nella confezione del supporto stesso.
Vedi figura 2.


3) Appoggiare il dispensatore al supporto avendo cura di inserire lo spinotto guida nel foro corrispondente sul supporto stesso. Vedi figura 3.

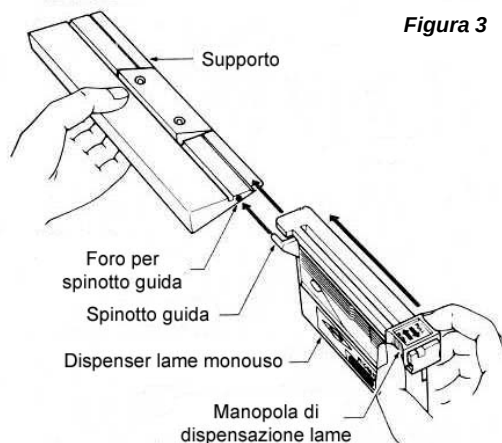

4) Spingere fuori la lama dal dispensatore tramite l'apposita manopola; la lama scorrerà sul supporto posizionandosi sotto la piastra di fissaggio.

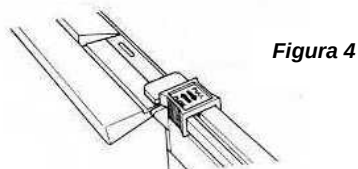

5) Aggiustare la posizione della lametta con il cacciavite come illustrato nella figura 5.

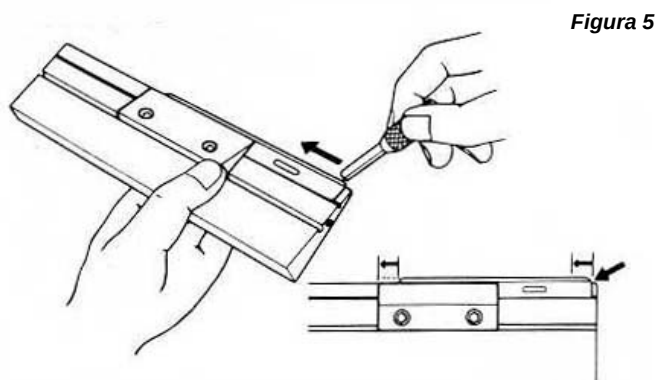

6) Serrare le viti di fissaggio.

Il prodotto è particolarmente tagliente e affilato. Si raccomanda l'uso di guanti antitaglio.