

**SEDIA GIREVOLE PER VASCA  
IN ACCIAIO VERNICIATO**

Codice	<b>AB-31</b>
Caratteristiche	Acciaio verniciato

**Descrizione ed indicazioni**

Sedia girevole per vasca con struttura in acciaio verniciato, seduta e schienale in polietilene e fori per il deflusso dell'acqua. Appoggi per vasca ricoperti in materiale plastico morbido.

Il dispositivo può essere ruotato a 360° in quattro posizioni da 90° per facilitare l'accesso alla vasca a persone con mobilità ridotta.

**Controindicazioni ed avvertenze**

Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.

**Materiali componenti**

Struttura e braccioli	<b>Acciaio</b>
Seduta e schienale	<b>Polietilene</b>
Appoggi per vasca	<b>Materiale plastico morbido</b>

**Modalità di smaltimento**

Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

**Dati tecnici**

Larghezza schienale	<b>35 cm</b>
Altezza schienale	<b>36 cm</b>
Altezza braccioli	<b>20 cm</b>
Distanza tra i braccioli	<b>50 cm</b>
Larghezza massima	<b>73 cm</b>
Peso	<b>5,5 kg</b>
Portata	<b>100 kg</b>

**Precauzioni**

Prima dell'utilizzo, verificare sempre il corretto posizionamento del dispositivo sui bordi della vasca ed il serraggio delle viti laterali. Controllare lo stato delle coperture in materiale plastico morbido degli appoggi per vasca. Assicurarsi della stabilità della sedia verificando che la leva di bloccaggio posta sotto la seduta sia debitamente fissata nel foro della posizione desiderata. Assistere sempre gli utilizzatori con limitate capacità di deambulazione.

**Pulizia e manutenzione**

Pulire dopo ogni utilizzo con panno morbido e detersivi neutri. Non impiegare sostanze acide e spugne abrasive. Disinfettare con normali sostanze a base alcolica.

Verificare periodicamente il funzionamento della leva di bloccaggio posta sotto la seduta. Controllare la tenuta delle saldature ed il corretto serraggio di viti e bulloni.

**Conservazione**

Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore ed umidità.  
Evitare l'esposizione diretta ai raggi solari.

**Garanzia** 24 mesi per difetti di produzione

**Codice CND: Y093303**

**Progressivo di registrazione: 330616**

**Produttore** INTERMED srl

Dispositivo Medico di Classe I conforme alla Direttiva 93/42/CEE