

Lame monouso per microtomia A35



Dispositivo medico-diagnostico in vitro
Codice CND: **W05030599**



Notizie generali

Lame monouso in acciaio inossidabile per taglio al microtomo, confezionate in dispensatore manuale predisposto per il recupero delle lame usate.

Codice	Confezionamento
01-A35	1 dispenser da 50 lame



Produttore: FEATHER Safety Razor Co., Ltd.
5th FL., 5-2, Dojima 1-chome, Kita-ku,
Osaka 530-0003, Japan

Distributore esclusivo per l'Italia: Bio-Optica Milano S.p.A.

Caratteristiche

Lame per microtomia monouso particolarmente indicate per il taglio di sezioni molto sottili. Ideali sia per campioni duri che morbidi.

Le lame monouso A35 garantiscono un'elevata qualità del taglio già dalle prime sezioni, richiedendo un breve trimming (avviamento della lama).

L'estremità tagliente è particolarmente affilata: questo permette alle lame A35 di durare di più anche con campioni duri.

Da utilizzare sia con microtomo a slitta che rotativo.


Nel dettaglio, quindi:

- Per tessuti duri e morbidi e per sezioni extra-sottili
- Lunga durata, anche con campioni duri
- Breve trimming
- Molto affilate

Dati tecnici

Materiale:	acciaio inossidabile
Lunghezza della lama:	80 mm
Altezza della lama:	8 mm
Angolo del tagliente:	35°
Confezionamento:	dispenser in ABS
Confezionamento unità di vendita:	scatole in carta vinilica rivestita
Conservazione e stoccaggio:	non sono previste particolari misure
Validità del prodotto:	5 anni, dalla data di confezionamento
Smaltimento:	da smaltire in conformità alle normative vigenti.

Schema sistema lama - portalama

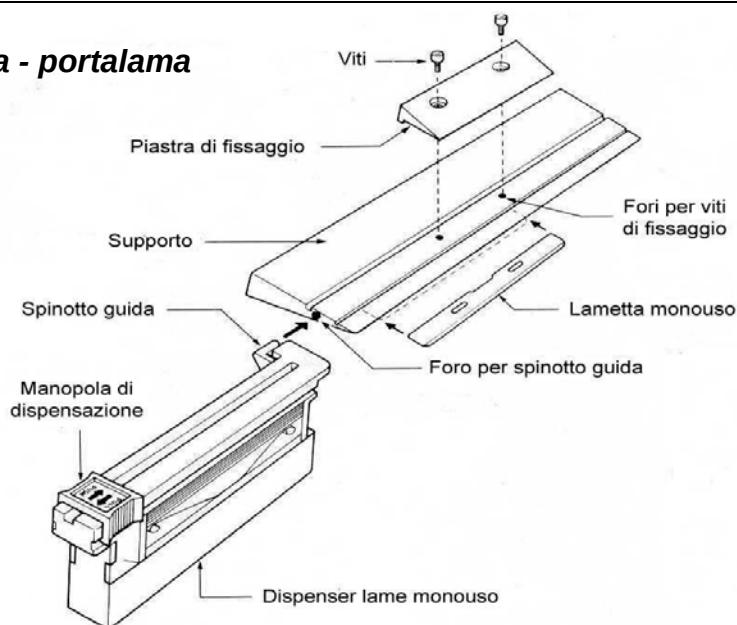

Modalità d'uso con portalama originale Feather

- 1) Fare scorrere la manopola di dispensazione come mostrato in figura 1.

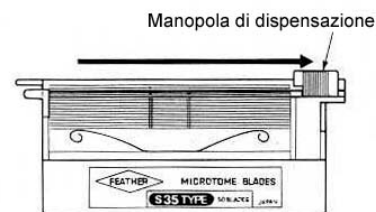


Figura 1

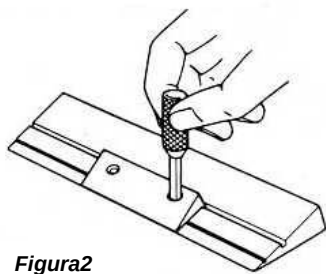


Figura 2

- 2) Allentare le viti della piastra di fissaggio del supporto per lame monouso Feather utilizzando l'apposito cacciavite contenuto nella confezione del supporto stesso.
Vedi figura 2.

3) Appoggiare il dispensatore al supporto avendo cura di inserire lo spinotto guida nel foro corrispondente sul supporto stesso. Vedi figura 3.

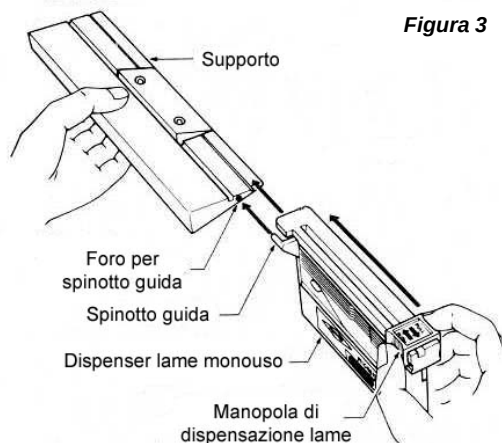


Figura 3

4) Spingere fuori la lama dal dispensatore tramite l'apposita manopola; la lama scorrerà sul supporto posizionandosi sotto la piastra di fissaggio.

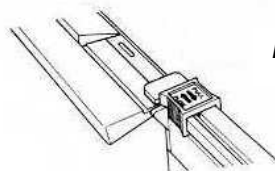


Figura 4

5) Aggiustare la posizione della lametta con il cacciavite come illustrato nella figura 5.

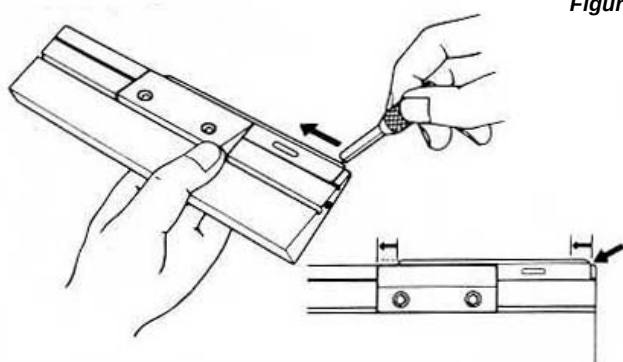


Figura 5

6) Serrare le viti di fissaggio.

Il prodotto è particolarmente tagliente e affilato. Si raccomanda l'uso di guanti antitaglio.